

Instruktioner för assisterad provtagning

För vårdpersonal


Capitainer qDBS provtagningskort



1


Material för provtagning:

- (a) Capitainer qDBS provtagningskort
- (b) Engångslansett
- (c) Alkoholsvabb
- (d) Kompress
- (e) Plåster
- (f) Returfodral
- (g) Streckkod

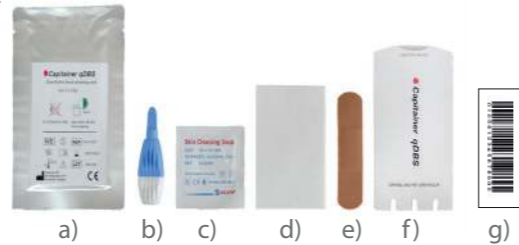


Placera materialet i den ordning som de kommer att användas.

2

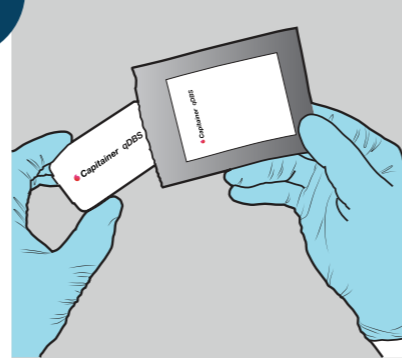


Förbered provtagningskortet (a) genom att ta ut den ur ytterförpackningen. Öppna kortet och lägg det på bordet. Rör inte provbrunnarna på kortet.

3

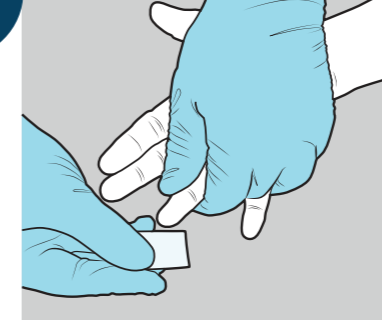


Förbered alkoholsvabben (c) genom att ta ut den ur ytterförpackningen. Välj ett finger att sticka i, lång- eller ringfinger. Desinficera därefter genom att tvätta fingret med alkoholsvabben (c) och låt torka i 5 sekunder.

4

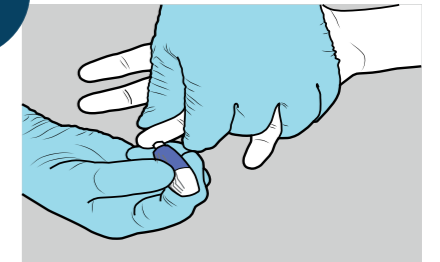


Förbered lansetten (b) genom att ta bort toppen på lansetten med ett vridmoment. Ta ett grepp runt fingertoppen för att den skall fyllas med blod. Stick på ena sidan av fingertoppen genom ett bestämt tryck med lansetten.

5

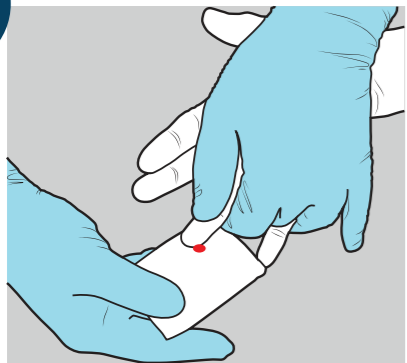


Torka av den första droppen blod med kompressen (d).

6

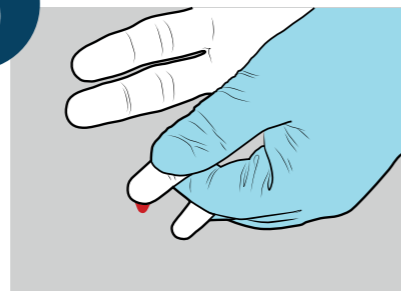


Låt handen hänga till dess att en ny **stor** bloddroppe bildas. Vänta på att droppen formas av sig själv och till dess att den nästan faller av sin egen vikt.

7

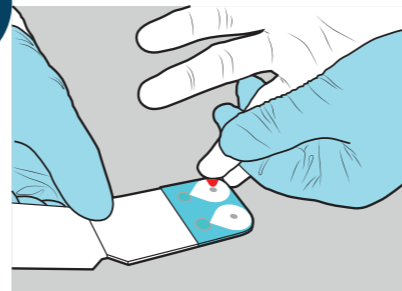


Ta upp provtagningskortet och applicera försiktigt blodroppen i provbrunnen i mitten av det vita området. Vänta tills en ny **stor** bloddroppe bildas och applicera droppen i den andra provbrunnen. **Endast en** droppe blod per provbrunn. Torka bort blodet på fingret med kompressen (d) och lägg tryck på fingret för att stoppa blödningen. Sätt på ett plåster (e).

8

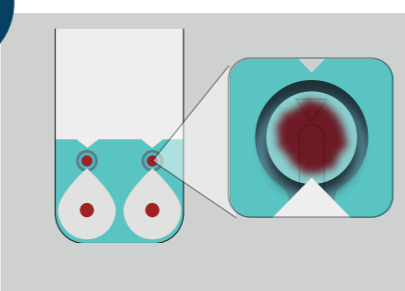

Kontrollera provtagningen. **Lyckad:** Kontrollfönstret har fyllts med blod enligt bild, helst i båda kontrollfönstren.

9

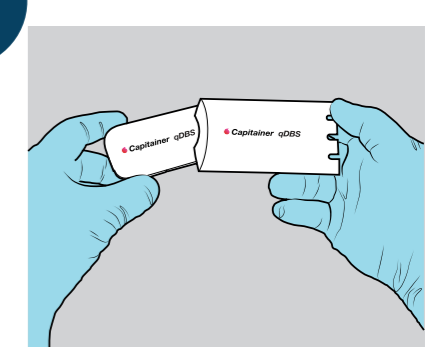

Vid lyckad provtagning, stäng provtagningskortet och klistra på streckoden på baksidan. (g). Lägg provtagningskortet i returfordralet (f), förslut och skicka i det förfrankerade kuvertet med posten.

* **Tillägg:** Om det råder tveksamheter rörande provtagningen; t ex om ingen eller bara en delvis blodfylld cirkel, kontakta då patientens vårdgivare/remittent



Capitainer

Capitainer AB, Solna Torg 19, SE-171 45 Solna
info@capitainer.se
www.capitainer.se
COPYRIGHT 2020 © CAPITAINER AB, ALL RIGHTS RESERVED



Använd QR-koden för instruktionsvideor